


Návod k použití GoTalk 4+

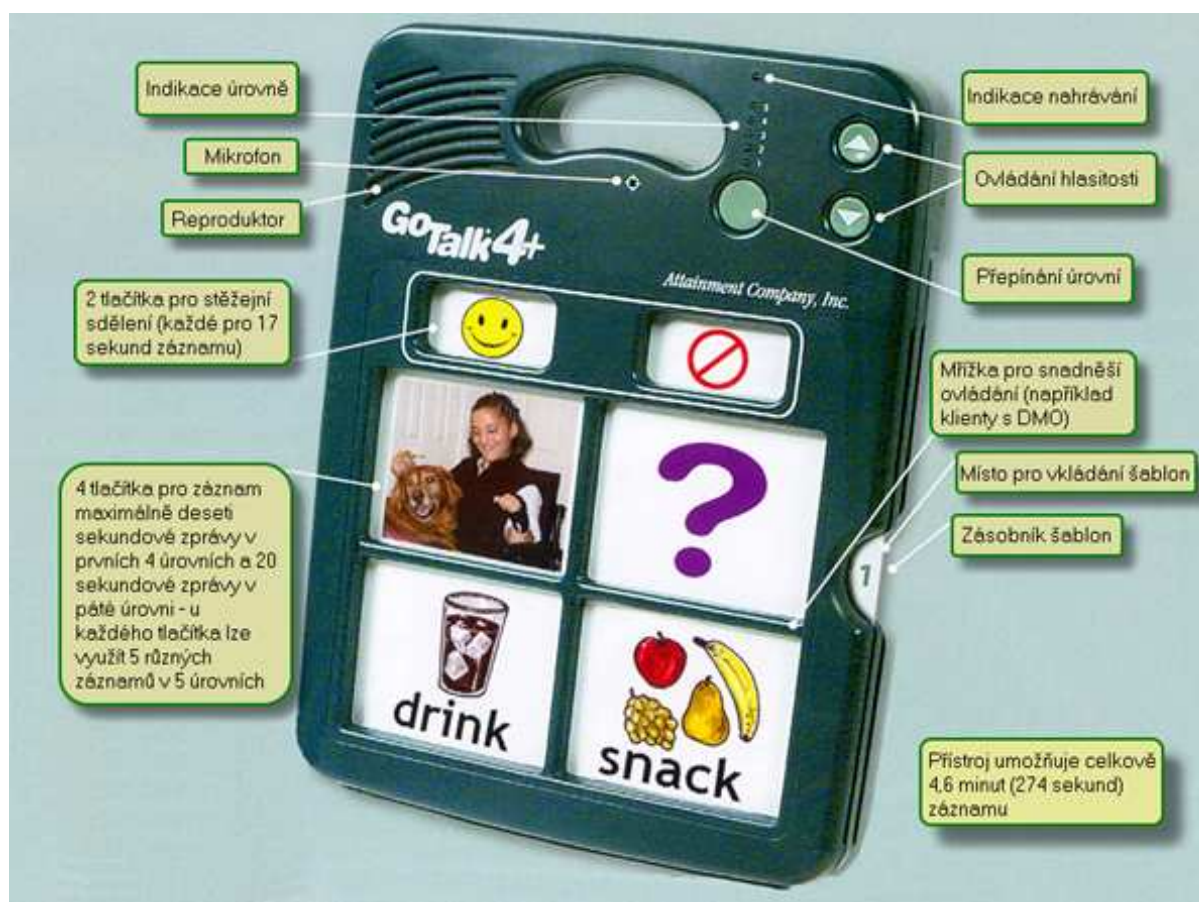

Nahrávání

Po zapnutí přístroje (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice ON) se ozve pípnutí, které oznamuje, že je zařízení připraveno k používání.

Nejdříve musíte nahrát vzkazy pro jednotlivá tlačítka v těch úrovních, které chcete používat.

Pro nahrávání stiskněte spínač nahrávání, který je umístěn na zadní části přístroje. Po stisknutí nahrávacího spínače se rozsvítí kontrolka nahrávání (červená LEDka) a zároveň i jedna z pěti zelených LEDek, která označuje číslo úrovně, pro kterou budete vzkazy nahrávat. Úroveň můžete měnit opakovaným stisknutím spínače pro změnu úrovně, který je umístěn pod signalizačními LEDkami.

U čtyřech základních vzkazových tlačítek můžete využít vždy maximálně 10 sekundový záznam pro první čtyři úrovně a 20 sekundový záznam pro pátou úroveň. U dvou tlačítek pro stěžejní sdělení můžete nahrát vždy maximálně 17 sekundový záznam, který je pro všechny úrovně vždy stejný.

Pro nahrání vzkazu stiskněte vybrané vzkazové tlačítko a v tom okamžiku začne červená kontrolka blikat a vy máte 10 (resp. 17, nebo 20) sekund na to, abyste nahráli potřebný vzkaz. Nahrávání přerušíte dotekem na libovolné vzkazové tlačítko, opětovným stisknutím spínače nahrávání, nebo překročením časového limitu 10 (resp. 17, nebo 20) sekund, kdy se nahrávání automaticky přeruší. Při ukončení nahrávání červená kontrolka přestane blikat.

Pokud budete nahrávat více vzkazů, nepřerušujte nahrávání stisknutím nahrávacího spínače, ale dotekem na libovolné vzkazové tlačítko. Další nahrávku zahájíte opět stiskem konkrétního vzkazového tlačítka. Nezapomeňte případně změnit úroveň při nahrávání pro jinou šablonu.

Pokud jste nahráli všechny zprávy, které potřebujete, stiskněte a uvolněte spínač nahrávání.



Přehrávání

Krátce stisknete některé vzkazové tlačítko, pro které jste předtím nahráli záznam. Vámi nahraná zpráva bude přístrojem přehrána a současně se rozblíká zelená LEDka právě zvolené úrovně. Hlasitost přehrávání můžete regulovat pomocí spínačů ovládající hlasitost. Horní spínač hlasitost zvyšuje, spodní spínač hlasitost snižuje.

Úrovně

Pro změnu úrovně krátce stisknete přepínač úrovní, který je umístěný pod zelenými LEDkami. Po stisknutí přepínače úrovní se rozblíká jedna ze zelených LEDek, čímž signalizuje, která z úrovní je právě aktuální. Pokud stisknete přepínač úrovní znovu, změníte tím úroveň. Úrovně lze rychle měnit rychlým stisknutím přepínače úrovní a to tak, že měníte úrovně od první směrem k páté a od páté skočíte zpět na první úroveň. Při změně úrovně nezapomeňte vyměnit šablony, aby vzkaz na tlačítku odpovídal symbolu na šabloně.

Pro vymazání všech vzkazů v aktuální úrovni stisknete krátce nahrávací spínač na zadní straně přístroje. Potom pomocí přepínače úrovní najdete tu úroveň, jejíž záznamy chcete vymazat. Pomocí kancelářské sponky nebo hrotem propisky či tužky stisknete spínač pro vymazání všech záznamů zvolené úrovně. Tento postup můžete opakovat, pokud chcete vymazat záznamy z více úrovní. Vymazání všech záznamů zvolené úrovně se nedotkne stěžejních sdělení nahranými pod horními dvěma vzkazovými tlačítky.

Možnosti uzamčení spínačů

Pro zakázání přehrání nebo vymazání nahraných vzkazů, nebo pro zamezení nechtěného přepnutí úrovně můžete tyto funkce uzamčít následujícím postupem:


- Uzamčení úrovní: Stisknete a držete stále stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro nahrávání stisknete **spodní** spínač pro regulaci hlasitosti. V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a aktuální úroveň je uzamčena. Pomocí přepínače úrovní nemůžete nyní změnit úroveň a k dispozici je jen uzamčená úroveň.
- Uzamčení nahrávání: Stisknete a držete stále stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro nahrávání stisknete **horní** spínač pro regulaci hlasitosti. V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a nahrávání záznamu je uzamčeno. V případě, že stisknete spínač nahrávání, červená LEDka se sice rozsvítí, ale při pokusu o zahájení nahrávání opět zhasne.
- Zrušení uzamčení úrovní i nahrávání: Vypněte přístroj (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice OFF). Stisknete a držete stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje a zároveň zapnete přístroj (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice ON). Počkejte až přístroj pípne – do té doby stále držete stisknutý přepínač pro nahrávání. Po signalizaci jsou možnosti přepínání úrovní a nahrávání opět přístupné.

Využití dvou tlačítek pro stěžejní sdělení

Zprávy nahrané pod tlačítka pro stěžejní sdělení jsou přístupné ve všech pěti úrovních. Tyto zprávy jsou ve všech úrovních stejné a dají se využít pro nahrání zásadních vzkazů – například pro nahrání pozdravů, zásadních dotazů, nebo nezbytných a stálých potřeb klienty v každé situaci.

Využití zásobníku šablon.

Kromě prostoru pro aktuální šablonu má přístroj i prostor pro umístění náhradních tabulek. Tímto způsobem může mít klient při sobě všech pět komunikačních tabulek a podle situace je lze rychle a pohodlně vyhledat a vyměnit.

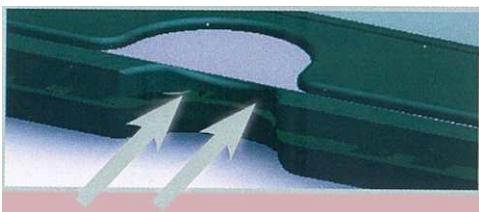

Vytváření šablon a komunikačních tabulek

Pro vytvoření šablon pro GoTalk můžete využít našeho programu ALTÍK, nebo programu „GoTalk overlay software“ od firmy Attainment Company, Inc. USA, který rovněž dodáváme. Tento program je však pouze v angličtině.