


Návod k použití GoTalk 9+

Nahrávání

Po zapnutí přístroje (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice ON) se ozve pípnutí, které oznamuje, že je zařízení připraveno k používání.

Nejdříve musíte nahrát vzkazy pro jednotlivá tlačítka v těch úrovních, které chcete používat. Pro nahrávání stiskněte spínač nahrávání, který je umístěn na zadní části přístroje. Po stisknutí nahrávacího spínače se rozsvítí kontrolka nahrávání (červená LEDka) a zároveň i jedna z pěti zelených LEDek, která označuje číslo úrovně, pro kterou budete vzkazy nahrávat. Úroveň můžete měnit opakovaným stisknutím spínače pro změnu úrovně, který je umístěn pod signalizačními LEDkami.

U devíti základních vzkazových tlačítek můžete využít vždy maximálně 8 sekundový záznam pro pět šablon (úrovní). U tří tlačítek pro stěžejní sdělení můžete nahrát vždy 12 sekundový záznam, který je pro všechny úrovně vždy stejný.

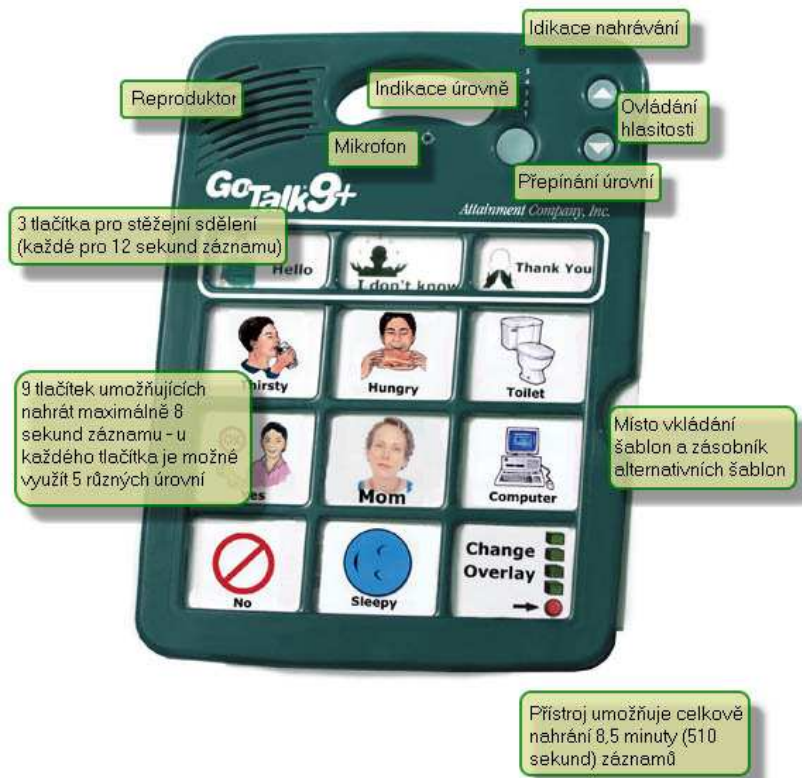

Pro nahrání vzkazu stiskněte vybrané vzkazové tlačítko a v tom okamžiku začne červená kontrolka blikat a vy máte 8 (resp. 12) sekund na to, abyste nahráli potřebný vzkaz. Nahrávání přerušíte dotekem na libovolné vzkazové tlačítko, opětovným stisknutím spínače nahrávání, nebo překročením časového limitu 8 (resp. 12) sekund, kdy se nahrávání automaticky přeruší. Při ukončení nahrávání červená kontrolka přestane blikat.

Pokud budete nahrávat více vzkazů nepřerušujte nahrávání stisknutím nahrávacího spínače, ale dotekem na libovolné vzkazové tlačítko. Další nahrávku zahájíte opět stiskem konkrétního vzkazového tlačítka. Nezapomeňte případně změnit úroveň při nahrávání pro jinou šablonu.

Pokud jste nahráli všechny zprávy, které potřebujete, stiskněte a uvolněte spínač nahrávání.

Přehrávání

Stiskněte (a uvolněte) některé vzkazové tlačítko, pro které jste předtím nahráli záznam. Vámi nahraná zpráva bude přístrojem přehrána a současně se rozbliká zelená LEDka právě zvolené úrovně. Hlasitost přehrávání můžete regulovat pomocí spínačů ovládající hlasitost. Horní spínač hlasitost zvyšuje, spodní spínač hlasitost snižuje.

Úroveň

Pro změnu úrovně stiskněte (a uvolněte) přepínač úrovní, který je umístěný pod zelenými LEDkami. Po stisknutí přepínače úrovní se rozbliká jedna ze zelených LEDek, čímž signalizuje, která z úrovní je právě aktuální. Pokud stisknete přepínač úrovní znovu, změníte tím úroveň. Úroveň lze rychle měnit rychlým stisknutím přepínače úrovní a to tak, že měníte úroveň od první směrem k páté a od páté skočíte zpět na první úroveň. Při změně úrovně nezapomeňte vyměnit šablony, aby vzkaz na tlačítku odpovídal symbolu na šabloně.

Pro vymazání všech vzkazů v aktuální úrovni stiskněte krátce nahrávací spínač na zadní straně přístroje. Potom pomocí přepínače úrovní najdete tu úroveň jejíž vzkazy chcete vymazat. Pomocí kancelářské sponky nebo hrotem propisky či tužky stiskněte spínač pro vymazání všech záznamů zvolené úrovně. Tento postup můžete opakovat, pokud chcete vymazat záznamy z více úrovní. Vymazání všech záznamů zvolené úrovně se nedotkne stěžejních sdělení nahranými pod horními třemi vzkazovými tlačítky.

Možnosti uzamčení spínačů

Pro zakázání přehrání nebo vymazání nahraných vzkazů, nebo pro zamezení nechtěného přepnutí úrovně můžete tyto funkce uzamčít následujícím postupem:


- Uzamčení úrovně: Stiskněte a držte stále stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro nahrávání stiskněte **spodní** spínač pro regulaci hlasitosti. V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a aktuální úroveň je uzamčena. Pomocí přepínače úrovně nemůžete nyní změnit úroveň a k dispozici je jen uzamčená úroveň.
- Uzamčení nahrávání: Stiskněte a držte stále stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro nahrávání stiskněte **horní** spínač pro regulaci hlasitosti. V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a nahrávání záznamu je uzamčeno. V případě, že stisknete spínač nahrávání, červená LEDka se sice rozsvítí, ale při pokusu o zahájení nahrávání opět zhasne.
- Zrušení uzamčení úrovně i nahrávání: Vypněte přístroj (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice OFF). Stiskněte a držte stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje a zároveň zapněte přístroj (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice ON). Počkejte až přístroj pípne – do té doby stále držte stisknutý přepínač pro nahrávání. Po signalizaci jsou možnosti přepínání úrovně a nahrávání opět přístupné.

Využití tří tlačítek pro stěžejní sdělení

Zprávy nahrané pod tlačítka pro stěžejní sdělení jsou přístupné ve všech pěti úrovních. Tyto zprávy jsou ve všech úrovních stejné a dají se využít pro nahrání zásadních vzkazů – například pro nahrání pozdravů, zásadních dotazů, nebo nezbytných a stálých potřeb klienty v každé situaci.

Využití zásobníku šablon

Kromě prostoru pro aktuální šablonu má přístroj i prostor pro umístění náhradních tabulek. Tímto způsobem může mít klient při sobě všech pět komunikačních tabulek a podle situace je lze rychle a pohodlně vyhledat a vyměnit.

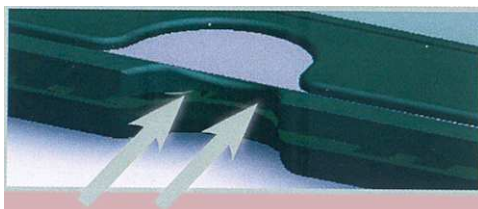

Vytváření šablon a komunikačních tabulek

Pro vytvoření šablon pro GoTalk můžete využít našeho programu ALTÍK, nebo programu „GoTalk overlay software“ od firmy Attainment Company, Inc. USA, který rovněž dodáváme. Tento program je však v angličtině.