

No Touch Talker – uživatelská příručka

1. Vložte do přístroje 4 přiložené tužkové baterie. Dbejte na správné pólování baterií.
2. Zapněte přístroj spínačem na zadní straně (do polohy ON). **Vyčkejte přibližně půl minuty na aktivaci přístroje.**
3. Při pohybu rukou kolem senzoru přístroje bude zařízení reagovat zvukem zvonku. Pokud se zvuk ozve, znamená to, že zařízení je připraveno k použití. Přístroj je schopen reagovat na pohyb do zhruba tří metrové vzdálenosti.
4. Pokud budete chtít používat zařízení jako komunikátor, musíte využít MEMO módu, do něhož se přepnete tlačítkem označeným MEMO. V MEMO módu je přístroj připravený k nahrání vašeho vzkazu. **Stiskněte (silně) tlačítko označené RECORD a držte jej stisknuté po celou dobu nahrávky.** Svítící červená dioda označuje, že nahráváte. Mluvte zřetelně do oblasti reproduktoru, kde je umístěn i mikrofon – přirozeným hlasem ze vzdálenosti 15 cm. Nahrávání ukončíte povolením stisku tlačítka RECORD. Maximální délka záznamu je 10 sekund.
5. K přehrání vzkaz stačí pohnout rukou nad senzorem a vámi pořízený vzkaz přístroj automaticky přehraje. Pro změnu vzkazu můžete kdykoliv použít postup popsany v předchozím bodě.
6. Pro vypnutí přístroje použijte vypínač na zadní straně – přesuňte jej do polohy OFF.

Problémy a jejich odstranění:

- A. v případě, že přístroj nepřehrává vzkaz, znamená to, že nejste v módu MEMO – přepněte se do něj tlačítkem označeným MEMO
- B. Pokud se vám nepodařilo nahrát váš vzkaz, pravděpodobně jste nedrželi po celou dobu nahrávání stisknuté tlačítko RECORD (červená dioda musí nepřerušovaně svítit po celou dobu nahrávání), nebo jste nebyli v MEMO módu.
- C. Pokud je reprodukce nekvalitní nebo slabá, zkuste vyměnit baterie.

