

## Základní instrukce k Little Mac

### Krok 1 – Instalace baterií

- otevřete kryt baterií umístěný na spodní straně přístroje
- vložte 9 voltovou baterii
- uzavřete kryt

### Krok 2 – Nahrávání zpráv

- zapněte přístroj otočením ovladače hlasitosti umístěným na zadní straně přístroje
- současně stiskněte nahrávací spínač i samotné tlačítko a držte je stisknuté po celou dobu nahrávání zprávy. Nahrávací spínač je umístěn na zadní straně přístroje a nad ním je kontrolka, která se rozsvítí v okamžiku zahájení nahrávání.
- Nahrajte pořadovanou zprávu. Mikrofon je umístěn vedle reproduktoru. Mluvte do něj zřetelně a srozumitelně ze vzdálenosti cca 20 cm.
- Po dokončení nahrávky uvolněte nahrávací spínač i tlačítko

### Krok 3 – Přehrání záznamu

- stiskněte velké tlačítko a případně upravte hlasitost otáčením ovladače hlasitosti umístěného na zadní straně přístroje


Spínač je dodáváný s průhledným plexisklovým krytem, pod který můžete umístit obrázek, symbol, nebo text charakterizující nahranou zprávu. Spínač lze použít i bez tohoto krytu.

## Přídavné možnosti zařízení

### *Přehrání zprávy pomocí externího tlačítka*

K přístroji lze připojit libovolný externí spínač vybavený 3,5 mm monofonním JACK konektorem.


Postup při použití externího tlačítka je následující:

1. Připojte externí tlačítko do zdířky na zadní straně přístroje, která je označena 
2. Nahrajte zprávu způsobem popsáným výše
3. Stiskněte externí tlačítko pro přehrání zprávy

### *Možnosti ovládání elektrické hračky nebo elektronického přístroje (magnetofonu, rádia...)*

K ovládání elektrické hračky nebo elektronického přístroje potřebujete bateriový adaptér, který najdete v naší nabídce (viz.: [http://www.petit-os.cz/adapt\\_tlac.htm](http://www.petit-os.cz/adapt_tlac.htm)).

Postup při ovládání elektrické hračky nebo elektronického přístroje je následující:

1. Otevřete bateriový kryt hračky a mezi jednu z baterií a kontakt vsuňte měděný plíšek bateriového adaptéru.
2. Uzavřete bateriový kryt hračky a do zdířky bateriového adaptéru zasuňte jeden konektor z přiložené prodlužovací šňůry.
4. Druhý konektor z prodlužovací šňůry zasuňte do zdířky Big/Little Macku, která je umístěna na jeho zadní straně a je označena: 
5. Nahrajte zprávu způsobem popsáným výše
6. Nyní již můžete stisknout velké tlačítko a současně s aktivováním hračky nebo přístroje se ozve i vámi nahraná zpráva...